

CM TraumaMattress™

CM ProLine



CM TraumaMattress är en tryckavlastande, intrahospital traumamadrass, avsedd för enkel och snabb immobilisering av traumapatienter.



Ergonomiska grepphandtag och lågfriktionsundersida underlättar förflyttningar till CT-bord, röntgenbord m.m.



CM TraumaCover Engångs-överdrag med huvudfixation.
Art.nr:
CMCOVER (vuxen, 15-pack)
CMCOVERM (barn, 15-pack)



CM T-Fix Huvudfixation
Art.nr: CMTFIX (25-pack)
Endast vuxenmodell

- ✓ SÄKER OCH STABIL IMMOBILISERING
- ✓ KRYSSBAND
- ✓ SÄKRA, SNABBA FÖRFLYTTNINGAR
- ✓ AVTAGBART ÖVERDRAG
- ✓ TRYCKAVLASTANDE, KOMFORTABEL

PRODUKTINFORMATION:

Intrahospital traumamadrass för immobilisering och patientförflyttningar. CT-kompatibel.

Svetsad, vätsketät stomme som består av en kolfibersandwich samt ett tryckavlastande lager av polyeter och viskoelastiskt polyuretanskum. Stötdämpande undersida av EVA.

Avtagbart överdrag med ovansida av vätsketät, stark polyesterväv och undersida av teflonbelagd, slitstark polyamid med lågfriktionsegenskaper.

Ergonomiska grepphandtag av glasfiber.

VUXENMODELL:

Mått: : 200 x 53 x 6 cm Vikt: C:a 8 kg

Art.nr: CMTRM

Namn: CM TraumaMattress med kroppsremmar

TILLBEHÖR VUXEN:

Överdrag till vuxenmodell Art.nr: CMTR1

Sidostabiliseringskuddar, set Art.nr: CMTR2

Kroppsremmar, komplett Velcro Art.nr: CMTR3

Kroppsremmar, komplett Nya Art.nr: CMTR3/4

CM TraumaCover Art.nr: CMCOVER

CM T-Fix Huvudfixation Art.nr: CMTFIX

CM ProSlide Glidskiva Art.nr: CMPRO

BARNMODELL:

Mått: 142 x 44 x 6 cm Vikt: C:a 5 kg

Art.nr: CMTRMM

Namn: CM TraumaMattress Mini med kroppsremmar

TILLBEHÖR BARN:

Överdrag till barnmodell Art.nr: CMTR1M

Sidostabiliseringskuddar, set Art.nr: CMTR2

Kroppsremmar, komplett set Art.nr: CMTR3M

CM TraumaCover Mini Art.nr: CMCOVERM



COMFORT medical

FRÅGOR OCH SVAR

1. Vilka är de största fördelarna med CM TraumaMattress?

Besvärliga och farliga förflyttningar undgås. Detta sparar tid och ökar patientsäkerheten. Tryckavlastande polstring minskar risken för tryckskador. Vid skador eller slitage kan överdraget lätt bytas ut. Krysskoppling som standard ger god immobilisering av överkroppen.

2. När och hur flyttar man över patienten till CM TraumaMattress?

Traumamadrassen bör placeras på akut-mottagningen där överflyttning sker. Olika överflyttningsmetoder kan användas:

- Ligger patienten på en vakuum-madrass, kan glidskivor placeras under patienten i samband med log-roll-manövern.
- Spineboard eller scoopbår kan placeras ovanpå traumamadrassen men bör snarast avlägsnas.

3. Hur placeras och fixeras patienten?

Patienten ska ligga centrerad på madrassen och med huvudet i rätt höjd för huvudfixationen. Inför transport fixeras först patientens kropp och därefter huvudet. För optimal stabilisering bör sidostabiliseringskuddar användas. Stabilisering av huvud/hacke med CM Cover eller CM T-Fix utförs enligt bruksanvisning.

4. Hur länge kan en patient ligga på CM TraumaMattress utan att riskera tryckskador?

Denna risk bör man alltid ha i åtanke. Parametrar som kropps-konstitution samt perifer cirkulation har stor betydelse för eventuell uppkomst av tryckskador. Det tryckavlastande materialet samt att patienten hålls varm och välcirkulerad, minskar denna risk.

5. Hur rengörs CM TraumaMattress?

- Kroppsband som har dekontaminerats med blod spolas i kallt vatten samt desinficeras enligt sjukhusets rekommendationer. Kan tvättas i maskin.

- Madrassens överdrag torkas av och desinficeras enligt sjukhusets rekommendationer.

Vid behov kan överdraget tas av och avspolas.

-Madrassen ska lufttorkas efter rengöring.

Stommen är svetsad och vätsketät. Kan avspolas och desinficeras.

Användande av CM TraumaCover minskar behovet av rengöring betydligt.

TILLBEHÖR



Avtagbart överdrag, komplett med handtag
Art.nr: CMTR1 (vuxenmodell)
CMTR1M (barnmodell)



Sidostabiliseringskuddar, set med 4 st.
Art.nr: CMTR2



Kroppsremmar, komplett set.
Art.nr: CMTR3/4 (vuxenmodell, utan velcro)
CMTR3 (vuxenmodell, med velcro)
CMTR3M (barnmodell, utan velcro)



ProSlide Glidskiva
Art.nr: CMPRO

ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB
Hjalmar Brantings väg 11G
261 43 Landskrona
Tel: 0046(0)733 10 90 20
0046(0)70 681 51 41

Mail: info@comfortmedical.se
www.comfortmedical.se

COMFORT medical